

# SARS-CoV-2 TEST PROTILÁTEK

IMUNOCHROMATOGRRAFIE S KOLOIDNÍM ZLATEM



## PŘESNÝ

Vysoce přečištěné protilátky  
s velkou specifikitou




## ÚČINNÝ

Výsledek k dispozici  
do 15 minut



## PRAKTICKÝ

Stačí vzorek krve z prstu

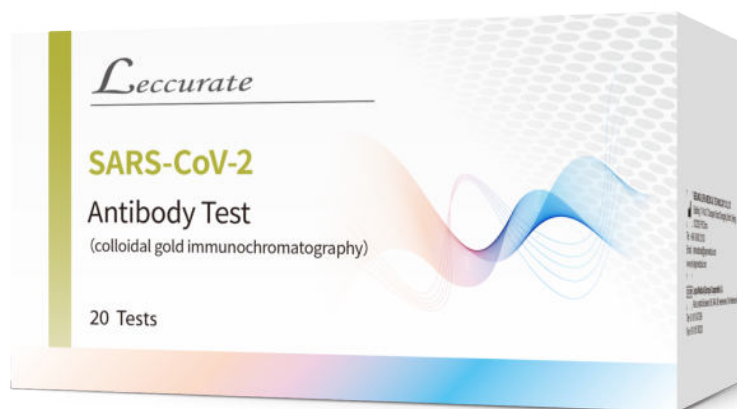



C: kvalitativní kontrolní linka  
G: IgG detekční linka  
M: IgM detekční linka

Okénko A : vzorek krve

Okénko B : zředěný vzorek

**Typ vzorku**

Plná krev / Plazma / Sérum

**Objem vzorku**

20ul / 10ul / 10ul

**Vyhodnocení**

do 15 min.

**Velikost balení**

20 testů v balení


**Skladování**

4-30 °C

**Spotřeba**

do 12 měsíců


## Test protilátek

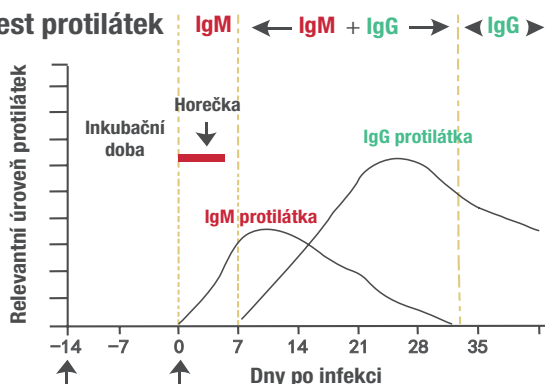


Protilátky jsou vylučovány po infekci virem. Immunoglobulin M (IgM) se objevuje jako první odpověď na infekci. Immunoglobulin G (IgG) se objevuje později a představuje specifitější a silnější protilátkovou odpověď.

## TESTOVÁNÍ


**Krok 1** Do okénka A přidejte 20 ul vzorku plné krve / 10 ul vzorku plazmy nebo séra.

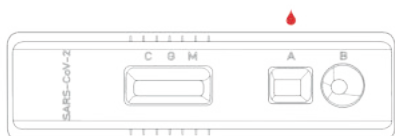


**Krok 2** Přidejte dvě kapky (asi 80 ul) zředěného vzorku do okénka B a vyčkejte.

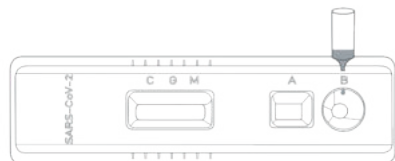


**Krok 3** Výsledky testu se zobrazí během 10-20 minut. Nevyhodnocujte výsledky po 20 minutách.

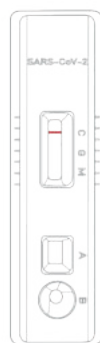

Negativní

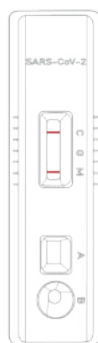

IgM  
Pozitivní

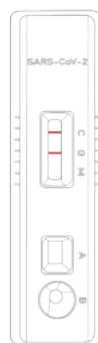

IgG  
Pozitivní



IgM/IgG  
Pozitivní

M : IgM  
detekční linka

G : IgG  
detekční linka

C : kvalitativní  
kontrolní linka



Neplatný



Neplatný



Neplatný



Neplatný